



CALCULADORA DE DILUCIÓN
DE TABLETAS DE CLORO

ESCANEA EL QR



TOALLAS DESINFECTANTES DESCARTABLES

UN SISTEMA. TODAS LAS APLICACIONES.



SISTEMA FLEXIBLE



ORIGEN ALEMANIA

**LIMPIA Y DESINFECTA
EN 1 SOLO PASO**

**APTO PARA TODO
DESINFECTANTE**

**115 TOALLAS
PRONTAS PARA USAR**

¿QUÉ ES Q®WIPES?

Q®wipes es el primer sistema flexible que permite generar wipes impregnadas prontas para usar para ambientes hospitalarios e industriales. Es compatible con toda clase de detergentes y desinfectantes de uso profesional para adaptarse a todo tipo de protocolos de higiene y aplicaciones. Ej. Cloro Orgánico, Hipoclorito, Peróxido de hidrógeno, Ácido peracético, Amonios cuaternarios, Detergentes neutros o alcalinos, Alcohol isopropílico, etc.

Q®wipes incluye un recipiente de alta resistencia, reutilizable, especialmente diseñado para asegurar la estabilidad de la solución empleada por hasta 30 días (cuando se utiliza Cloro Orgánico). El sistema incluye packs de 115 toallas de 25 x 35 cm de alta calidad, elaboradas con tecnología resistente, que no deja residuos ni pelusas.

Q®wipes es un sistema "seco" que puede ser utilizado con Cloro Orgánico, así como con cualquier otro producto desinfectante. La institución tiene la libertad de utilizar el producto y las concentraciones que crea convenientes según el área a desinfectar.



MODOS DE USO

CLORO ORGÁNICO C. DIFFICILE



ÁREAS CRÍTICAS Y SEMICRÍTICAS



- **Añadir 2.5 lts de agua** en un recipiente **Q®wipes**.
- **Agregar las tabletas indicadas**, según sea necesario. **Aguardar 20 minutos** hasta su completa disolución.
- Incorporar un rollo de **Toallas Q®wipes** en la solución y cerrar el recipiente herméticamente.
- **Antes de usar** se debe aguardar hasta que las toallas se encuentren completamente saturadas: entre 45 y 60 minutos.
- **Limpia y desinfecta en un mismo paso. Efectivo contra C.difficile en 4 minutos.**
- En caso de uso en metales, enjuagar luego de transcurrido el tiempo de contacto.

MODOS DE APLICACIÓN



Abrir el recipiente, retirar una toalla y volver a cerrar.



Aplicar sobre la superficie hasta dejarla completamente húmeda.

Dejar actuar según los tiempos de acción del producto.

