

infecciónzero®

bioQ⁵

DETERGENTE DESINFECTANTE

ULTRACONCENTRADO DE USO PROFESIONAL



2 EN 1
**LIMPIA Y
DESINFECTA**

CON AMONIOS CUATERNARIOS DE

5GEN



VIRUCIDA · BACTERICIDA · FUNGICIDA · MICOBACTERICIDA

**COMPATIBLE CON TODO
TIPO DE SUPERFICIES Y
MATERIALES**

**EL MÁS CONCENTRADO
DEL MERCADO**
28% DE PRINCIPIO ACTIVO

**MAYOR RENDIMIENTO A
MENOR COSTO**
1 L RINDE 400 L DE SOLUCIÓN
PREPARADA


¿QUÉ ES bioQ^{®5}?

- Es el detergente desinfectante, basado en amonios cuaternarios, más avanzado y eficaz del mercado.
- Formulado con una mezcla sinérgica de amonios cuaternarios de 5ta generación para obtener un mayor poder de desinfección con menores tiempos de contacto.
- Es compatible con todo tipo de superficies lavables, equipamiento y dispositivos, lo que lo transforma en un producto ideal para su uso diario en las distintas áreas de la institución.
- Combina un gran poder de Limpieza, Desinfección y Desodorización en una misma acción.
- Permanece con un efecto bacteriostático activo entre 24 a 48 horas.
- Es eficaz contra Virus, incluyendo el coronavirus, Bacterias, Hongos y Micobacterias.

Compromiso con el medio ambiente



100% BIODEGRADABLE Y ECOLÓGICO

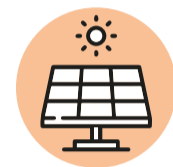

SUSTENTABLE
elaborado 100% con energías renovables

APLICACIONES



bioQ^{®5} es recomendado para aplicación en pisos, paredes, puertas, mesadas, mobiliario, techos, luminarias, vidrios, baños, superficies de alto contacto en general.



Su uso es recomendado para desinfección en ambientes industriales (especialmente industrias alimentarias) comerciales, deportivos, educativos, shoppings, supermercados, clínicas, oficinas y todas aquellas áreas que requieran de altos niveles de higiene.



MODO DE USO



Diluir el producto en agua a temperatura ambiente.

Aplicar sobre la superficie utilizando un paño, mopa, spray o pulverizador.



Dejar actuar por al menos 5 minutos.

No requiere enjuague ya que continúa activo por entre 24hs a 48hs.



En superficies en contacto con alimentos enjuagar con abundante agua.

DILUCIONES Y TIEMPOS DE CONTACTO

Limpieza y Desinfección	2,5 ml x litro de agua (1:400)	5 min.	Virus - Bacterias - Hongos
--------------------------------	--------------------------------	--------	----------------------------

Para los casos en que se requiera una desinfección con efecto micobactericida utilizar una dilución de 5ml x litro de agua (1:200) 15 min.

Componente Activo: Cloruro de alquil dimetil bencil amonio, Cloruro de dimetil didecil amonio.

Color: Ámbar claro

Aroma: Característico (sin aromas artificiales)

PH Diluciones de uso: 6.5 - 7.5

Reg. MSP: 89285



2026-03-05 - Versión 4