



+



USO RECOMENDADO

infecciónzero®

DeterQ[®] AK1



DETERGENTE ALCALINO

PARA REPROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

SIN SURFACTANTES, SIN CLORADOS, FORMULACIÓN DE BAJA ESPUMA.

Infecciónzero® DeterQ[®] AK1 está indicado para uso en Lavadoras Termodesinfectadoras Automáticas de instrumental médico y de laboratorio. Es un detergente alcalino con una performance de limpieza única dado su pH mayor a 10 en las diluciones de uso.


Infecciónzero® DeterQ[®] AK1 es indicado para la remoción eficaz de componentes orgánicos como sangre, huesos, mucosas, así como todo tipo de proteínas, grasas y carbohidratos. Está recomendado para ser utilizado en conjunto con DeterQ[®] N1, para garantizar una protección completa tanto del instrumental como de la máquina.

DOSIS DE USO

La dosis de uso recomendada de **Infecciónzero® DeterQ[®] AK1** es entre 0,2% - 0,8% (2 a 8ml/l), dependiendo del grado de suciedad del material y la dureza del agua.

COMPOSICIÓN

Compuestos alcalinos, agentes secuestrantes, inhibidores de corrosión.

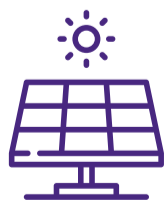

Infecciónzero® DeterQ[®] AK1 es un producto ecológico, biodegradable y fabricado bajo una estricta filosofía de sustentabilidad: su producción es realizada completamente con energías renovables (paneles fotovoltaicos).



+

USO
RECOMENDADO

infecciónzero®

DeterQ[®] N1



AGENTE NEUTRALIZANTE ACELERADOR DE SECADO Y ABRILLANTADOR

PARA REPROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Infecciónzero® DeterQ[®] N1 está indicado para uso en Lavadoras Termodesinfectadoras Automáticas de instrumental médico y de laboratorio, luego de la etapa de limpieza con detergentes alcalinos.


Infecciónzero® DeterQ[®] N1 neutraliza los residuos del agente alcalino, protegiendo tanto los instrumentos como la máquina, evitando depósitos de calcificaciones y otros residuos inorgánicos. Está formulado para funcionar también como abrillantador del instrumental y como un efectivo acelerador del secado, contribuyendo a la eficacia final del ciclo de reprocesamiento.

DOSIS DE USO


La dosis de uso recomendada de **Infecciónzero® DeterQ[®] N1** es entre 0,1% - 0,5% (1-5mL/L), dependiendo del tipo y concentración del detergente alcalino.

COMPOSICIÓN

Ácidos orgánicos, tensoactivos no-iónicos.

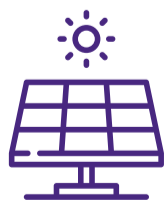

Infecciónzero® DeterQ[®] N1 es un producto ecológico, biodegradable y fabricado bajo una estricta filosofía de sustentabilidad: su producción es realizada completamente con energías renovables (paneles fotovoltaicos).

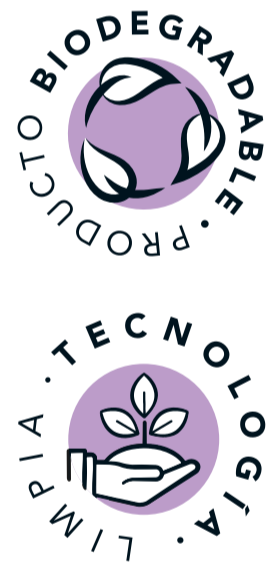

2026-03-02 - Versión 3