

infecciónzero®

# EnzyQ<sup>®</sup> MAX

## ESPUMA DETERGENTE ENZIMÁTICO

LISTO PARA USAR



### FÓRMULA DE DOBLE ACCIÓN

EVITA EL SECADO Y ADHERENCIA DEL MATERIAL ORGÁNICO

AYUDA A DEGRADAR LA SUCIEDAD EN LAS SUPERFICIES DEL INSTRUMENTAL

infecciónzero®

# EnzyQ<sup>®</sup> MAX

## ¿QUÉ ES EnzyQ<sup>®</sup>?


**Infeccionzero® EnzyQ<sup>®</sup> MAX** es una espuma detergente enzimática diseñada específicamente para el prelavado de instrumental médico-quirúrgico. Su avanzada fórmula de doble acción genera una espuma que mantiene el instrumental húmedo, previniendo el secado y la fijación de material orgánico.

Al mismo tiempo, su acción enzimática contribuye a degradar la suciedad al romper las cadenas proteicas presentes en las superficies del instrumental, lo que facilita su posterior lavado, ya sea manual o automatizado.

**Compromiso con el medio ambiente**




**100% BIODEGRADABLE Y ECOLÓGICO**

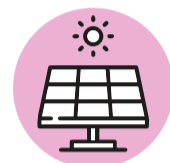


**SUSTENTABLE**  
elaborado 100% con energías renovables

## FORMAS DE USO

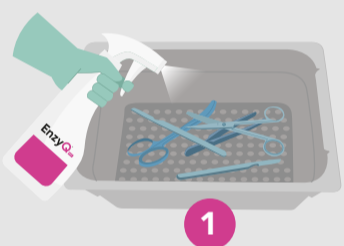


Rociar **EnzyQ<sup>®</sup> MAX** sobre los instrumentos contaminados en una bandeja de inmersión.

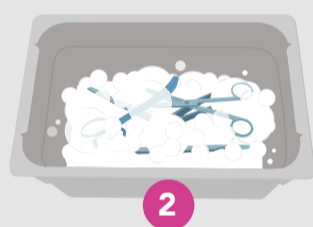

Cubrir nuevamente todo el instrumental con espuma. Para una mejor adherencia se recomienda rociar a una distancia de 10cm.



Colocar una tapa sobre la bandeja para cubrirla.

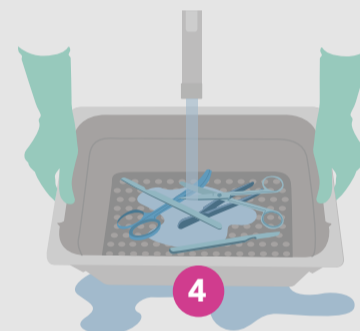

Enjuagar cuidadosamente el instrumento tratado con agua del grifo para eliminar todos los residuos de producto y suciedad orgánica antes de continuar con la limpieza, ya sea manual o con máquina.

### Componente Activo:


**Proteasa y tensoactivos no iónicos**

**Color:** Líquido incoloro

**Aroma:** Característico (sin aromas artificiales)

**PH:** 7 - 8.5

**Reg. MSP:** 97484

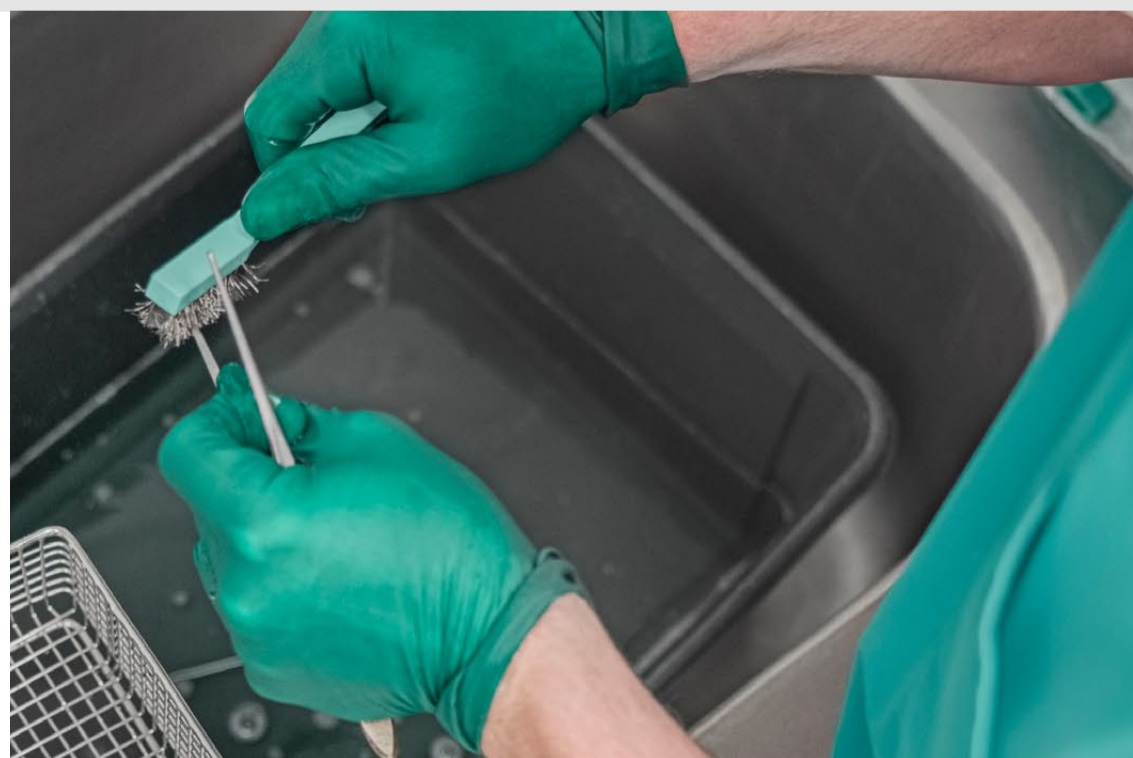

2026-03-02 - Versión 2

**infecciónzero<sup>®</sup>**  
desinfectantes de calidad profesional

Laboratorio  
**mediQ<sup>®</sup>**

LIFENIR S.A.  
Justicia 2069 CP 11300  
Montevideo, Uruguay  
Tel.: 2400 30 20 / Fax: 2400 73 20

info@mediq.com.uy  
mediq.com.uy