

infecciónzero®

# EnzyQ®

## DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO

ULTRACONCENTRADO



PARA REPROCESAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCOPIOS

**FÓRMULA DE ESPUMA CONTROLADA**  
COMPATIBLE CON LAVADORAS  
TERMODESINFECTADORAS

**EXCELENTE COMPATIBILIDAD DE MATERIALES**

**EXTRA PODER DE LIMPIEZA**

infecciónzero®

# EnzyQ®

## ¿QUÉ ES EnzyQ®?


**Infeccionzero® EnzyQ®** es un detergente multienzimático ultraconcentrado, desarrollado para obtener una limpieza de alta performance en material quirúrgico, dispositivos médicos y endoscopios. Su fórmula especial de baja espuma permite una total flexibilidad de uso: lavado manual por inmersión, lavadoras ultrasónicas, lavadoras termodesinfectadoras, lavadoras de endoscopios. **infecciónzero EnzyQ®** es un producto ecológico, biodegradable y fabricado bajo una estricta filosofía de sustentabilidad: su producción es realizada 100% con energías renovables (paneles fotovoltaicos).

**Infeccionzero® EnzyQ®** fue desarrollado bajo la premisa de obtener un detergente multienzimático único en el mercado. Su formulación incluye los surfactantes no iónicos más avanzados del mercado junto a las máximas concentraciones de enzimas disponibles en un producto de estas características. El resultado es un detergente con una capacidad de limpieza superior a diluciones extremadamente bajas, obteniendo un costo-beneficio medioambiental y económico sin igual.

Compromiso con el  
*medio ambiente*




**100% BIODEGRADABLE  
Y ECOLÓGICO**

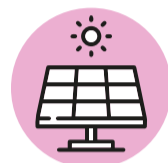

**SUSTENTABLE**  
elaborado 100% con  
energías renovables

## FORMAS DE USO

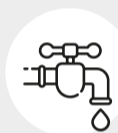

Posible utilización entre 0,05% y 0,4% según el grado de suciedad del material.




Eficaz a partir de entre 1 a 5 minutos, dependiendo del tipo de limpieza (manual o automática), temperatura del agua y grado de suciedad.



Efectivo en todas las temperaturas del agua (incluso frío). Para obtener los mejores resultados de limpieza se recomienda utilizar a una temperatura de entre 35°C a 50°C. Temperatura máxima 60°C.

## DOSIS DE USO RECOMENDADA

**0,1% (1ML DE EnzyQ® POR CADA LITRO DE AGUA).**

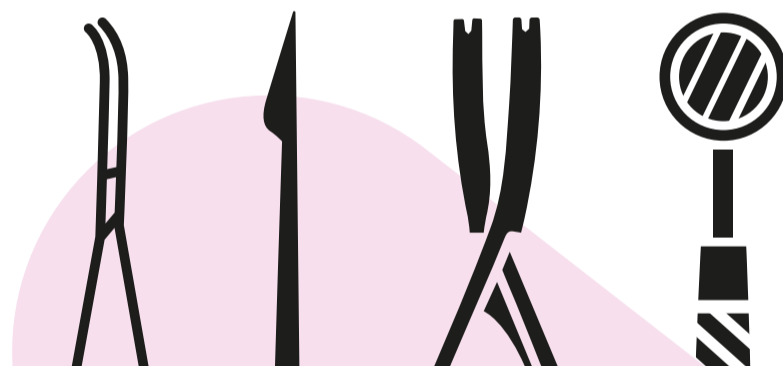

### Componente Activo:

**Surfactantes no iónicos, agente secuestrante, agente estabilizante, enzimas: proteasa, lipasa, amilasa**

**Color:** Líquido amarillo claro

**Aroma:** Característico (sin aromas artificiales)

**PH Solución concentrada:** 7.5 - 9.0

**PH Diluciones de uso:** 7.0 - 8.0

**Reg. MSP:** 91272



2026-03-02 - Versión 2

**infecciónzero®**  
desinfectantes de calidad profesional

Laboratorio  
**mediQ®**

LIFENIR S.A.  
Justicia 2069 CP 11300  
Montevideo, Uruguay  
Tel.: 2400 30 20 / Fax: 2400 73 20

info@mediq.com.uy  
mediq.com.uy