

infecciónzero®

# OXIQ®

## LIMPIADOR DESINFECTANTE

DE USO HOSPITALARIO

ELIMINA  
HASTA EL  
**99,9999%**  
DE  
BACTERIAS



**2 EN 1**  
LIMPIA Y  
DESINFECTA

**PHP®**  
PERÓXIDO  
DE HIDRÓGENO  
POTENCIADO

VIRUCIDA · BACTERICIDA · FUNGICIDA · MICOBACTERICIDA · ESPORICIDA

RÁPIDA ACCIÓN

ULTRACONCENTRADO

NO CORROSIVO

Laboratorio  
**mediQ®**

LIFENIR S.A.  
Justicia 2069 CP 11300  
Montevideo, Uruguay  
Tel.: 2400 30 20 / Fax: 2400 73 20

  
info@mediq.com.uy  
mediq.com.uy

infecciónzero®

# OXIQ®


## ¿QUÉ ES OXIQ®?

El limpiador desinfectante más avanzado del mercado. **Infecciónzero® OXIQ®** es un limpiador y desinfectante de grado hospitalario ultraconcentrado de última generación. Su formulación basada en **PHP® Peróxido de hidrógeno Potenciado**, permite combinar en una misma acción un poder de limpieza avanzado con un nivel de desinfección esporicida. Por sus características es el primer producto que permite implementar protocolos de higiene de 1 solo paso en áreas hospitalarias críticas y semi críticas, de una forma segura y eficaz. **Infecciónzero® OXIQ®** fue desarrollado siguiendo las tendencias actuales que recomiendan el uso de desinfectantes de amplio espectro y rápida acción. Es eficaz contra **VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, MICOBACTERIAS y ESPORAS (Incluyendo C.difficile)**. Recomendado para su aplicación en todo tipo de superficies y dispositivos médicos no invasivos. Siguiendo lineamientos internacionales para los productos destinados a ambientes hospitalarios, fue desarrollado sin colorantes ni aromas artificiales.

## Compromiso con el medio ambiente



**100% BIODEGRADABLE Y ECOLÓGICO**

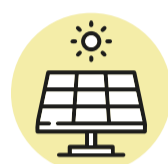

**SUSTENTABLE**  
elaborado 100% con energías renovables

## APLICACIONES



**Infecciónzero® OXIQ®** es recomendado para aplicación en pisos, paredes, puertas, mesadas, mobiliario, techos, luminarias, vidrios, baños, superficies de alto contacto en general y todo tipo de equipamiento y dispositivos médicos no invasivos.



En las diluciones recomendadas de uso, **Infecciónzero® OXIQ®** no presenta acción corrosiva.

## MODO DE USO



Diluir el producto en agua a temperatura ambiente (según las diluciones recomendadas).



Aplique sobre la superficie y/o dispositivo médico no invasivo utilizando paño, mopa, toallas descartables, spray o sistemas de pulverización.



Deje actuar en base a los tiempos de acción establecidos. No requiere enjuague.

En superficies en contacto con alimentos enjuagar con abundante agua.

## DILUCIONES Y TIEMPOS DE CONTACTO

Limpieza	2,5ml x litro de agua (1:400) 5 ml x litro de agua (1:200)
----------	---

Desinfección Amplio Espectro	10 ml x litro de agua (1:100)
------------------------------	-------------------------------

Desinfección Terminal (y/o áreas con riesgo de C.Difficile)	40 ml x litro de agua (1:25)
--	------------------------------

Virus, Bacterias, Micobacterias	5 min.
Hongos	10 min.
Esporas	20 min.

### Componente Activo:

**Peróxido de Hidrógeno 7.5% p/p (15% de 200 volúmenes)**

**Color:** Incoloro

**Aroma:** Característico (sin aromas artificiales)

**PH Solución concentrada:** 3.0 – 5.0

**PH Diluciones de uso:** 4,5 – 5,5

**Reg. MSP:** 90179



2026-02-26 - Versión 4