

infecciónzero®

OXIQ® MAX

DESINFECTANTE ESPORICIDA

PARA ÁREAS CRÍTICAS



2^{EN}1

**LIMPIA Y
DESINFECTA**

PHP®
PERÓXIDO
DE HIDRÓGENO
POTENCIADO

VIRUCIDA · BACTERICIDA · FUNGICIDA · ESPORICIDA

**MÁXIMO PODER DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**
EN SOLO 1 PASO

RÁPIDA ACCIÓN
EFICAZ EN TAN SOLO 1 MINUTO

PRONTO PARA USAR

Laboratorio
mediQ®

LIFENIR S.A.
Justicia 2069 CP 11300
Montevideo, Uruguay
Tel.: 2400 30 20 / Fax: 2400 73 20

info@mediq.com.uy
mediq.com.uy


¿QUÉ ES OXIQ® MAX ?

Infeccionzero® OXIQ® MAX es un poderoso limpiador de uso hospitalario de última generación. Gracias a la formulación basada en **PHP® Peróxido de hidrógeno Potenciado**, combina un alto poder de limpieza y desinfección en una misma acción, contribuyendo a mejorar los tiempos de aplicación de los protocolos de higiene sin sacrificar la eficacia biocida requerida.

Infeccionzero® OXIQ® MAX fue desarrollado siguiendo las tendencias actuales que recomiendan el uso de desinfectantes de amplio espectro y rápida acción. Es eficaz contra VIRUS, BACTERIAS, HONGOS y ESPORAS; y es efectivo desde 5 minutos. Recomendado para su aplicación en todo tipo de superficies y dispositivos médicos no-invasivos.

Infeccionzero® OXIQ® MAX fue desarrollado específicamente como un producto pronto para usar con capacidad esporicida, para facilitar el combate contra los microorganismos más resistentes a nivel hospitalario, entre ellos el C.difficile. Su fórmula fue adicionada de componentes específicos para dotar de la estabilidad necesaria que asegure su capacidad biocida al momento de uso.

Compromiso con el
medio ambiente

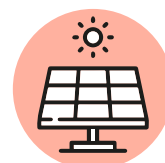

SUSTENTABLE
elaborado 100% con
energías renovables

APLICACIONES



Infeccionzero® OXIQ® MAX es recomendado para aplicación en puertas, mesadas, mobiliario, vidrios, baños, superficies de alto contacto en general y todo tipo de equipamiento y dispositivos médicos no invasivos.



Infeccionzero® OXIQ® MAX no presenta acción corrosiva.

MODO DE USO



Pulverizar sobre la superficie de alto contacto y/o dispositivos médico no invasivo a desinfectar.



Aplique sobre la superficie y/o dispositivo médico no invasivo utilizando paño o toallas descartables.

Deje secar respetando el tiempo de contacto indicado.

No requiere enjuague.

TIEMPOS DE CONTACTO

Virus - Bacterias - Hongos 5 minutos

Esporas 20 minutos

Componente Activo: Peróxido de Hidrógeno 1.5% p/p
(3% de 200 volúmenes)

Color: Incoloro

Aroma: Característico (sin aromas artificiales)

PH: 3,00 – 4,90

Reg. MSP: 90751

OXIQ® MAX PRESENTACIÓN 5L



**Impregnar
Q®wipes**



**Recarga
spray 750mL**

